

機械器具（36）医療用ピンセット

一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN コード：31814000

再使用禁止


検診用ピンセット

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 本来の目的以外には使用しないこと。
3. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

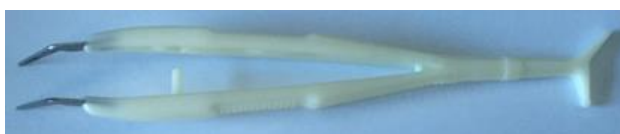

全長 165mm

2. 原材料

ハンドル：ABS 樹脂
作業部：ステンレススチール

3. 包装

10 本／パック

【使用目的又は効果】

口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を開閉し、組織等を把持する。

【使用上の注意】

- (1) 本来の目的以外に使用しないこと。
- (2) 本品の使用はディスプレイとし、再使用を禁止する。
- (3) 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。
- (4) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。
- (6) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒートリングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- (2) 保管中、損傷しないように注意すること。

[有効期間]

包装材に記載の使用期限までに使用すること [自己認証(製造

所データ)による]

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800