

再使用禁止

VM ミキシングチップ

**【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記外観写真の通り



2. 原材料 プラスチック
3. 包装 各 50 個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科印象材を練和する為に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) V ミキサー（別売）に専用カートリッジ（別売）を取り付ける。
- 2) 専用カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、本品の黒い穴に V ミキサー先端部の金属部分を差込むようにして装着する。
- 3) V ミキサーを操作し、2 種のペーストが均等に練和されることを確認し、印象材を吐出する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・使用前に本品がカートリッジ又は確実に装着されていることを確認すること。
- ・使用する V ミキサーと印象材等の詳細についてはそれぞれの添付文書又は取扱説明書を参照すること。
- ・しばらく使用しない場合は、チップの入口付近のベース又はカタリストが硬化している場合があるので、ミキシングチップをつけずに試し出しをして確認すること。また、ペーストが硬化している場合は探針等で除去すること。

**【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はディスプレイとし、再使用を禁止する。
- 2) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 4) 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光を避け、室温で保管すること。
- 2) 使用後は地方自治体の法則に則り適切な処分を行うこと。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：FONG YU PRECISION CO., LTD
製造国：台湾

製造業者：SPIDENT CO., Ltd.
製造国：大韓民国