

**【禁忌・禁止】**

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**\* 【形状、構造及び原理等】**

1. 構成



全長 : 135mm

2. 原材料

ステンレススチール

**【使用目的又は効果】**

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために使用する。

**【使用方法等】**

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守)
- 2) ハンドル部を開閉し、破折リーマやペーパーポイントなどを把持する。

**【使用上の注意】**

- 1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。(乾燥工程を含む、134℃以下厳守)
- 2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食 (錆び) することがある。
- 3) 超酸化水 (超酸性水) 等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- 4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
  - ・ 使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・ 洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
  - ・ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
  - ・ 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
  - ・ 加熱滅菌器 (オートクレーブ滅菌器等) の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む 134℃以下厳守】。
  - ・ 水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

**【保管方法及び有効期間等】**

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】**

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル  
住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : Medesy s. r. l. (メデシ社)  
製造国 : イタリア