

機械器具 (36) 医療用ピンセット

一般医療機器 ピンセット JMDN コード : 35079001

MDSY マイクロサージカルツイーザー

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]
下記の通り



各タイプ : 全長 180 mm

型番	作業部
1063	—
1063 / TC	タングステンカーバイド加工
1064 / D	ダイヤモンド加工
1064 / T	
1064 / OY	

[包装]

1 本 / 包

[原材料]

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

皮膚や組織及び異物等を把持するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守)
- 2) ハンドル部を開閉し、組織等を把持する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行う。
- 2) 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- 3) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・ 使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・ 洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
 - ・ 洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・ 加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意

すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度(乾燥工程も含む) 134℃以下厳守】。
・ 水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル
住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : Medesy s.r.l. (メデシ社)
製造国 : イタリア