

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDNコード：35531000

再使用禁止

Ci サージカルドレープ Ab

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 齒愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
不織布製または不織布にポリエチレンフィルムを貼り合せたドレープで、全体サイズ（60×60cm、90×120cm等）、穴/スリットの形状及びサイズ、粘着テープの有無の組み合わせによる種類がある。
2. 原材料
不織布、ポリエチレン
3. 包装
1枚 / パック

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために用いる、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認する。
- 2) 無菌操作で包装から取り出す。
- 3) 粘着テープ付きの場合は台紙をはがし、使用目的の部位・場所に掛けて使用する。

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品はディスポーザブル製品であり、再使用・再滅菌はしないこと。
- 3) 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
- 4) 高温を発生する機器類に接しないように注意すること。
- 5) 粘着テープをはがす際には、皮膚からゆっくりはがすこと。
- 6) 本品の使用により、皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
- 7) 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光、水濡れ、高温、多湿の環境を避け、涼しいところで保管すること。

【使用期限】

包装に記載の使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
（※YYYY-MMはYYYY年MM月を示す）