

正宗フラッシュ

【禁忌・禁止】

1. 本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
性状：ペースト状
色調：白色
2. 包装 50 g
3. 原材料
酸化アルミニウム、脂肪酸、水

製造業者：株式会社 ダイテックジャパン 大平工場
住所：静岡県沼津市大平667-7
電話番号：055-935-1200

【使用目的又は効果】

硬質レジン、床用レジン（PMMA・ポリスルフォン）、貴金属等の最終艶出し研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 歯科用電気駆動装置を低速回転し、本材をバフ・ブラシ等に付着させる。
- 2) 歯科用電気駆動装置を通常の回転速度に戻し、通法に従い研磨作業を行う。
- 3) 研磨終了後は、被研磨物を中性洗剤等で十分洗浄する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸収しないこと。本材の研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネなどを使用すること。
 - ・研磨作業後は、石鹸をつけたブラシ等で十分な洗浄を行うこと。他の製品との混用は避けること。
2. 重要な基本的注意
 - ・本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
 - ・本材が目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。