

## 正宗ケンマポイント

### 【禁忌・禁止】

- 1) 注意事項を厳守の上、使用すること。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状・構造等】

#### 1. 形状・構造



HP 用

| タイプ | 全長   | 作業部  |      | 軸部   |
|-----|------|------|------|------|
|     |      | 最大径  | 長さ   | 長さ   |
| #1  | 59.5 | 11.0 | 24.5 | 35.0 |

(単位：mm)

#### 2. 原材料

作業部：GC（グリーンカーボラダム）砥粒、  
合成繊維、ポリビニールアルコール等  
軸部：ステンレススチール

#### 3. 包装

3 本入 / ケース

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

### \*【使用方法等】

#### 【使用方法】

歯科用電気駆動装置に装着し、補綴物等を研磨する。

最大回転数：5,000 rpm

推奨回転数：3,000 rpm

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

### 【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
3. 片減りなど生じた時は速やかに修正し、常に芯振れのない状態で使用すること。
4. 研磨時の火花が研磨屑の粉塵に着火し、燃えることが有るので粉塵がダクト等に溜まらないよう、又火花が粉塵の中に入らないようにすること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：株式会社ダイテックジャパン大平工場