

正宗ラバーホイール

【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

形状		
タイプ	ソフト	ミディアム
サイズ（mm） （外径×厚さ×孔径）	22.0×2.9×1.8	22.0×3.2×1.8

2. 原材料
合成ゴム、
ホワイトランダム砥粒又はグリーンカーボン砥粒
3. 包装
12 個／箱

【使用目的又は効果】

歯科材料の軟質・硬質レジン、パラジウム合金、コバルトクロム合金等の研削、研磨に用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

本品を歯科用マンドレールに装着して研磨を行う。

推奨回転数 10,000rpm
最大回転数 15,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

- ・ 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：株式会社ダイテックジャパン大平工場