

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード：16184000

再使用禁止

ディスポプロフィー

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【使用上の注意】

- 1) 歯科従事者以外は使用しないこと。
- 2) 本品は単回使用とし、再使用を禁止する。
- 3) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 4) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

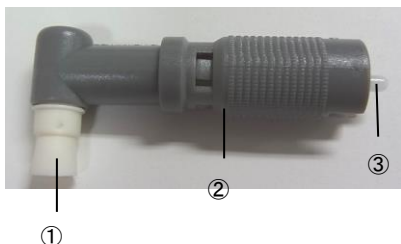

2. 原材料
 - ①TPR（サーモプラスチックラバー）
 - ②ポリカーボネート
 - ③ポリオキシメチレン

3. 包装
144 個 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 本品を PMTC 専用の歯科用電気駆動装置に取り付ける。
 - 2) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
 - 3) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
- ※最大回転数：6,000rpm
推奨回転数：1,200rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・指定の回転数を超過して使用しないこと。
- ・使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- ・使用に関しては、本品を歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛散することがあるので注意すること。
- ・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：DHEF Inc.（ディーエイチイーエフ社）
製造国：台湾