


Biz ラバーダムフレーム α

*【禁忌・禁止】

- 1) 本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

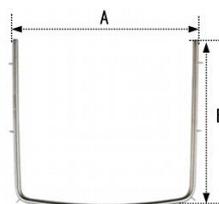

| タイプ | サイズ(A×B) |
|-------|-----------|
| アダルト | 126×115 |
| チャイルド | 107×106.5 |

(単位: mm)

2. 原材料
ステンレススチール
3. 包装
1本 / 包

【使用目的又は効果】

ラバーダムシートを本品に装着し、術野を防湿する際に用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認する。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む134℃厳守。)
- 2) フレームの突起部分にラバーダムシートを伸張させながら引っ掛け、フレーム内にダムを形成する。

*【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し、滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 4) 洗浄・滅菌について
[洗浄]
・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前、使用後は、破損、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800