

再使用禁止

チタンベース NT

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 適切な術前診断、治療計画を行ったうえで、メーカーの指定する器具などを使用すること。
3. 口腔内で使用しないこと。
4. ワックスアップ接触箇所以外にはサンドブラスト処理は行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

下記のとおり

代表例：Nobel Replace 6.0mm (E 830)



チタンベース



スクリュー

2. 仕様

タイプ	メーカー型番
Camlog 3.3mm	CAM 80330000
Camlog 3.8mm	CAM 80380000
Camlog 4.3mm	CAM 80430000
Camlog 5.0mm	CAM 80500000
Conelog 3.3mm GH0.8mm	COL 80330008
Conelog 3.8/4.3mm GH0.8mm	COL 80384308
Conelog 5.0mm GH0.8mm	COL 80500008
Nobel Replace 3.5mm NP	E 800
Nobel Replace 4.3mm RP	E 810
Nobel Replace 5.0mm WP	E 820
Nobel Replace 6.0mm	E 830
Nobel Active 3.5mm NP	F 800
Nobel Active 4.3/5.0mm RP	F 810
3i Certain 3.4mm NP	H 800
3i Certain 4.1mm RP	H 810
3i Certain 5.0mm WP	H 820
OSSTEM TS 3.5mm	H10 80350000
OSSTEM TS 4.0-6.0mm	H10 80406000
3i Osseotite Ex-Hex 3.4mm	I 800
3i Osseotite Ex-Hex 4.1mm	I 810
3i Osseotite Ex-Hex 5.0mm	I 820
Nobel Branemark 3.5mm	K 800
Nobel Branemark 4.1mm	K 810
Nobel Branemark 5.1mm	K 820
Straumann BL-3.3mm NC	L 800
Straumann BL-4.1/4.8mm RC	L 810
Straumann TL-3.5mm NN	N 800
Straumann TL-4.8mm RN	N 810
Straumann TL-6.5mm WN	N 820
Tapered Screw-Vent 3.5mm	R 800
Tapered Screw-Vent 4.5mm	R 810
Tapered Screw-Vent 5.7mm	R 820
Astra OsseoSpeed TX 3.5/4.0 mm	S 800
Astra OsseoSpeed TX 4.5/5.0 mm	S 820
Xive 3.4mm	T 800
Xive 3.8mm	T 805
Xive 4.5mm	T 810
Xive 5.5mm	T 820
Astra SEV 3.0mm	SEV 80300000
Astra SEV 3.6mm	SEV 80360000
Astra SEV 4.2mm	SEV 80420000
Astra SEV 4.8mm	SEV 80480000
Astra SEV 5.4mm	SEV 80540000
NEOSS 3.5-5.5mm	NEO 80355500

2. 原材料

本体：チタン合金

スクリュー：チタン合金

3. 包装

Camlog タイプ、Conelog タイプ：

チタンベース 1 個、スクリュー 2 個/ 包

その他：チタンベース、スクリュー 各 1 個/ 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 適切な前加工、前処理を行い、作業模型のインプラントラボアナログに付属のスクリューを用いて本品を取り付ける。
- 2) 本品の上に目的に応じた形態のワックスアップを行う。
- 3) 歯科 CAD システムでスキャニングを行い、ワックスアップの形態に応じた素材加工を CAM システムにて行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用者は、使用する際に本製品の的外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。(著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。)
- 2) 過剰な外圧をかけないこと。
- 3) 使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はインプラントの知識を有する歯科医師の指導・指示のもと、作業、操作を行うこと。
- 2) 回転防止対策等による加工は強度減少の恐れがあるため、最小限の加工にとどめること。
- 3) マージンカラー部を大きくはみ出したり、カラー部基底面より下方に位置するワックスアップは行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：nt-trading GmbH & Co. KG

(エヌ ティー トレーディング社)

製造国：ドイツ