

スピーディーディスク

【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



サイズ：直径 22mm、厚さ 0.6mm

2. 原材料

ブラックカーボンシリサイド

3. 包装

100 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は技工用研削材のディスクで、歯科用マンドレルを使用し、科技工用ハンドピースに装着して、回転させ、研削・研磨する。主にポーセレンの隣接面やマージンの切削及び仕上げに用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着する。
 - 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、歯科技工用ハンドピースに装着し回転させて、研削、研磨する。
- ※最大回転数：25,000 rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科技工用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

- ・ 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：PRODONT-HOLLIGER S. A. S（プロドント 利ガ-社）
製造国：フランス