

*2022年1月作成（第2版）

2017年2月作成（第1版）

届出番号：17B2X10001001145

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDNコード：70901000

スピーディーディスク

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観写真は下記の通り



2. 原材料

ブラックカーボンシリサイド

3. 包装

100枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は技工用研削材のディスクで、歯科用マンドレルを使用し、
科技工用ハンドピースに装着して、回転させ、研削・研磨する。
主にポーセレンの隣接面やマージンの切削及び仕上げに用い
る。

【使用方法等】

[使用方法]

- 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着する。
- 試運転して回転に振れ等がなければ、歯科技工用ハンドピースに装着し回転させて、研削、研磨する。
※最大回転数：25,000 rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科技工用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：PRODONT-HOLLIGER (A Company of Acteon Group)
(プロドント ホリガー社)

製造国：フランス