

**2018 年 10 月改訂（第 4 版）

*2018 年 6 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001001153

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

ダイヤモンドポリッシングペースト MD

【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：ペースト状

製品番号	粒子サイズ
10213.001	1.0 μm
10213.002	3.0 μm

2. 原材料

ポリエチレングリコール、グリセリン、ダイヤモンド粒子、メチルパラベン、プロピルパラベン

3. 包装

1 本（3 g） / 包

【使用目的又は効果】

ポーセレン、レジン、金属等の艶出しに用いる。

【使用方法等】

- 1) 少量を歯科用電気駆動装置に装着されたコットンホイール又はフェルトホイールなどに塗布する。
- 2) コットンホイール等をポーセレン、コンポジット等の補綴物に軽くあてながら、ポリッシングを行う。
- 3) 最終仕上げ等には粒子サイズ 1.0 μm のものを使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本材を使用する際は、本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のないことを確認すること。
- 2) 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために患者及び施術を行う者は保護眼鏡を使用すること。
- 3) 万が一、本材が目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医の診察を受けること。
- 4) 本材を直接天然歯面に塗布しないこと。
- 5) 高回転で圧力をかけて使用すると、研磨面が焼きつく恐れがあるので、注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

5℃～27℃で保管すること。

[使用期限]

外箱に記載されている使用期限までに使用すること。（自己認証[製造所データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

使用前に硬化、変色等がないかを点検すること。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

（スリーアール インダストリア コマーシオ エイレリ社）

製造国：ブラジル