

## 歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDNコード：70901000

## グラスファイバーセパディスク

## 【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

## 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



タイプ	サイズ
A	25×0.2 mm
B	25×0.3 mm
C	25×0.5 mm

2. 原材料  
合成樹脂、グラスファイバー

3. 包装  
10個 / パック

## 【使用目的又は効果】

本品は技工用研削材のディスクで、歯科用マンドレルを使用し、歯科用電気駆動装置に装着して、回転させ、研削・研磨する。

## 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着する。
  - 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、歯科用電気駆動装置に装着し回転させて、研削、研磨する。
- ※最大回転数：25,000 rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、本品を装着したマンドレルを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Acurata GmbH & Co. KG（アキュラタ社）  
製造国：ドイツ