

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDNコード：70901000

グラスファイバーセパディスク

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



A	φ 25 mm × 0.2 mm
B	φ 25 mm × 0.3 mm
C	φ 25 mm × 0.5 mm

2. 原材料
合成樹脂、グラスファイバー

3. 包装
10個 / パック

【使用目的又は効果】

本品は技工用研削材のディスクで、歯科用マンドレルを使用し、
歯科用電気駆動装置に装着して、回転させ、研削・研磨する。

【使用方法等】

[使用方法]

- 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着する。
- 試運転して回転に振れ等がなければ、歯科用電気駆動装置に
装着し回転させて、研削、研磨する。
※最大回転数：25,000 rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは
使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、本品を装着したマ
ンドレルを確実に奥まで装着したことを確認してから使用す
ること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、
破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管す
ること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

*【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食
がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止するこ
と。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：acurata GmbH & Co. KG（アキュラタ社）
製造国：ドイツ