

DESS アナログ

*【禁忌・禁止】

1. 本品は、ニッケル及びクロムを含有するため、これらの成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり
代表例：MULTI-UNIT RP



タイプ	型番
ASTRA OSSEOSPEED UNIABUTMENT 20°	14. 036
ASTRA OSSEOSPEED UNIABUTMENT 45°	14. 037
ASTRA TECH EV UNIABUTMENT	14. 058
STRAUMANN BONE LEVEL NP/RP	14. 098
MULTI-UNIT RP	14. 007
MULTI-UNIT RP pack of 10	14. 007-P10
MULTI-UNIT WP	14. 047
MULTI-UNIT WP pack of 10	14. 047-P10

2. 原材料
ステンレススチール

3. 包装
1 個 / 包 又は 10 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ピックアップ印象法
- 1) 埋入されたインプラント体に印象用コーピング（別売）をセットする。
 - 2) メーカー指示のもと、印象用個人トレーを製作する。またはインプラント用印象用トレーを使用する。（※場合によっては印象に先立ち、残存歯のアンダーカット部分をユーティリティワックスや寒天印象材等を用いてブロックアウトしておく。）
 - 3) 印象コーピングが確実に装着されていることを確認の後、メーカー指示のとおり印象採得を行う。
 - 4) 印象材硬化後、メーカー指示のもと、トレーを口腔内より取り外す。その際、印象用コーピングがインプラントから外れ、印象材内に取り込まれているかを確認すること。

- 5) 印象材に取り込まれた印象用コーピングに本品を連結し、確実に固定する。
- 6) トレーに超硬石膏を注入し石膏模型を完成させる。

*【使用上の注意】

- 1) 本品はニッケルとクロムが含まれているため、ごく少数ではあるが、これらの成分に対してアレルギー反応が生じた場合は、患者へ医師の診断を受けるように指示すること。
- 2) 使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。（著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。）
- 3) 過剰な外圧をかけないこと。
- 4) 使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。
- 5) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Terrats Medical, S.L.
（テラッツ メディカル社）

製造国：スペイン