

## CRCチタンベース

### 【禁忌・禁止】

- 適切な術前診断、治療計画を行ったうえで、メーカーの指定する器具などを使用すること。
- 口腔内で使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

|    |                    |                                     |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | Straumann          | Tissue Level Narrow                 |
| 2  |                    | Tissue Level Regular                |
| 3  |                    | Tissue Level Wide                   |
| 4  |                    | Bone Level Narrow                   |
| 5  |                    | Bone Level Regular                  |
| 6  | Nobel Biocare      | External Type Branemark Narrow 3.3  |
| 7  |                    | External Type Branemark Regular 3.7 |
| 8  |                    | Type Active Narrow 3.5              |
| 9  |                    | Type Active Regular 4.3             |
| 10 |                    | Type Replace Narrow 3.5             |
| 11 |                    | Type Replace Regular 4.3            |
| 12 |                    | Type Replace Wide 5.0               |
| 13 | ASTRA              | Type Aqua 3.5                       |
| 14 | Osseo Speed        | Type Lilac 4.5                      |
| 15 | Xive               | 3.4                                 |
| 16 |                    | 3.8                                 |
| 17 |                    | 4.5                                 |
| 18 |                    | 5.5                                 |
| 19 | Camlog             | K Type 3.3                          |
| 20 |                    | K Type 3.8                          |
| 21 |                    | K Type 4.3                          |
| 22 |                    | K Type 5.0                          |
| 23 |                    | K Type 6.0                          |
| 24 | Osstem GG/TS       | Narrow                              |
| 25 |                    | Regular                             |
| 26 | 3i Internal        | 3.4                                 |
| 27 |                    | 4.1                                 |
| 28 |                    | 5.0                                 |
| 29 | 3i External        | 3.4                                 |
| 30 |                    | 4.1                                 |
| 31 |                    | 5.0                                 |
| 32 | Zimmer<br>Type TSV | Narrow 3.5                          |
| 33 |                    | Regular 4.5                         |
| 34 | Bio Horizons       | Narrow 3.5                          |
| 35 |                    | Regular 4.5                         |
| 36 |                    | Wide 5.7                            |

#### 2. 原材料

チタンベース：チタン

スクリュー：チタン

スキャンボディ：ポリアセタール

#### 3. 包装

セット内容：チタンベース、スクリュー、スキャンボディ  
各1個 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科用 CAD/CAM システムを使用し計測・設計を行い、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

#### チタンベース(付属品：スキャンボディを含む)の使用手法

##### 1. 準備

使用する歯科用 CAD/CAM システムの CAD ソフトウェア内にあるスキャンボディ(計測用ジグ)ライブラリーに本品が存在することを確認すること。

##### 2. 使用方法

- インプラント作業模型から歯肉再現部(ガムシリコン部)を取り外す。埋入されているフィクスチャーアナログ(ラボアナログ)に本品のチタンベースを適切な位置に合わせて付属の専用スクリューにて装着・固定する。
- 付属の専用スキャンボディを隙間ができないように注意し、溝に合わせてチタンベースに取り付ける。
- スキャンボディを装着したインプラント作業模型を歯科用 CAD/CAM システムの計測器を使用して計測する。
- 使用する歯科用 CAD/CAM システムの CAD システムの使用手順に合わせ、コンピューター画面上にて歯科用インプラントの上部構造を設計する。

### 【使用上の注意】

- 本品の使用はインプラントの知識を有する歯科医師の指導・指示のもと、作業、操作を行うこと。
- 回転防止対策等による加工は強度減少の恐れがあるため、最小限の加工にとどめること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Dental OK, Inc. (デンタルオーケー社)

製造国：大韓民国