


再使用禁止

SMSドレープ

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

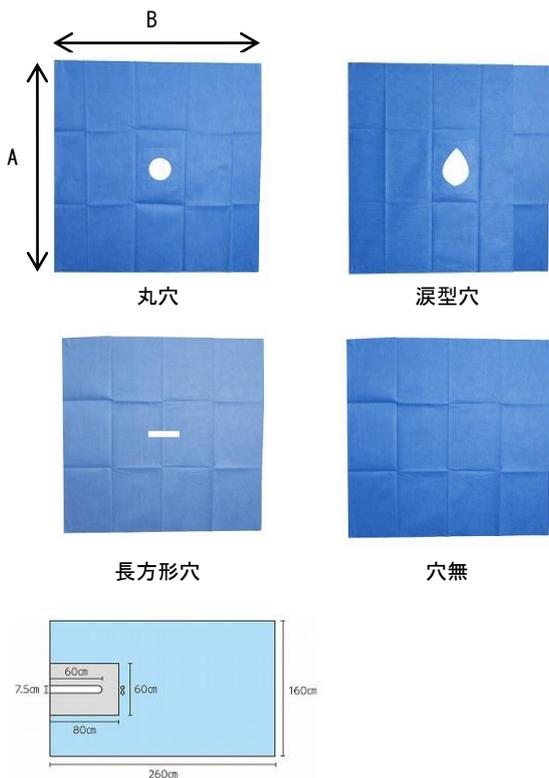

U

2. 仕様

タイプ	A	B	穴サイズ*	厚さ	テープ
丸穴	60	60	φ9	50g/m ²	無
	90	90			
	120	120			
	60	60			有
	90	90			
	120	120			
涙型穴	60	60	10.5 × 7.5		無
	90	90			
	60	60			有
	90	90			
長方形穴	60	60	2 × 10		無
	90	90			
穴無	60	60	-	無	
	90	90			
U	160	260	7.5 × 60	有	

[単位：cm]

3. 原材料

全体：SMS 不織布
テープ部：粘着テープ

4. 包装

1枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具で、患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。単回使用である。

【使用方法等】

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷又は水漏れがないことを確認する。
- 2) 使用目的にあったドレープを選択し、無菌操作で包装から取り出す。
- 3) 使用目的の部位・場所に掛けて使用する。

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は Disposable 製品であり、再使用・再滅菌はしないこと。
- 3) 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
- 4) 高温を発生する機器類に接しないよう注意すること。
- 5) 粘着テープをはがす際には、皮膚からゆっくりはがすこと。
- 6) 本品の使用により、皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
- 7) 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。
- 8) 包装に記載されている有効期限内に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
（ MM-20YY は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800