

機械器具（50）開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 JMDN コード：70948009

LuxaScope 喉頭鏡

【禁忌・禁止】

- ・MRI 装置室内に本品を持ち込まないこと。
- ・本品の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
- ・本品を改造、改変しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

1) ブレード




サイズ	全長
No. 0	79 mm
No. 1	91 mm
No. 2	113 mm
No. 3	131 mm
No. 4	154 mm
No. 5	176 mm

サイズ	全長
No. 0	81 mm
No. 1	92 mm
No. 2	114 mm
No. 3	134 mm
No. 3C	134 mm
No. 4	154 mm
No. 5	174 mm

※3C は強湾曲タイプ

2) ハンドル

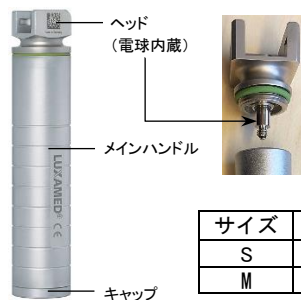

サイズ	全長	直径
S	140 mm	20 mm
M	140 mm	30 mm

2. 原材料

ブレード：ステンレススチール、光ファイバー
ハンドル：ステンレススチール、真鍮（クロムメッキ）

3. 包装

ブレード、ハンドル：各 1 個 / 箱 交換用電球：1 個 / 袋

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 適切なサイズのブレードとハンドルを選択する。
- 2) 使用前に滅菌済みかどうか確認する。（オートクレーブ可。乾燥工程含む 134 °C 以下厳守。）
- 3) ハンドルサイズに適した電池（別売）を用意する。
S サイズハンドル：単三アルカリ乾電池 2 本
M サイズハンドル：単二アルカリ乾電池 2 本
- 4) ハンドルのキャップを回して取外し、メインハンドル内に＋極を上向きに電池を入れる。キャップを取付ける。
- 5) ハンドルにブレードを装着し、照明光が出ることを確認する。
- 6) 使用後はハンドルからブレードを外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本シリーズの製品以外を組み合わせで使用しないこと。
- ・ブレード装着前にハンドルのヘッドを確実に回し締めること。

- ・使用後は、洗浄前に必ずハンドルから電池と電球を取外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しない場合は、ハンドルから電池を取出して保管すること。
- ・粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。

* 【保守・点検に係る事項】

【洗浄】

- ・ハンドルから電池と電球を取外したら、直ちに流水下でブレード、ハンドルの残留物を除去すること。
- ・超音波洗浄機は使用しないこと。
- ・電球はアルコールで拭き、液体に浸漬しないこと。
- ・磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
- ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
- ・洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ・ハンドル内のプラスチックプレートを外して洗浄等を行った場合は、電池と電球の接触不良を防ぐため、確実に元の位置まで回し入れること。
- ・機械洗浄時は機器の取扱説明書に従い使用すること。

【消毒】

- ・ハンドル表面は拭き取りまたは浸漬による消毒可。
消毒剤は本品の材質に適したものを選び、薬剤メーカー指定の取り扱い方法に従うこと。
- ・熱水消毒は 93 °C を上限とすること。

【滅菌】

- ・電池と電球を取外してオートクレーブ等で滅菌を行うこと。（オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134 °C 以下厳守。）

【電池交換】

- ・使用方法に指定の電池以外は使用しないこと。

【電球交換】

- ・電球が完全に冷えていることを確認してから行うこと。
- ・取外し方法：ヘッドを回し緩めてメインハンドルから外し、ヘッド側のホルダーから電球を引き出す
- ・取付け方法：電球をホルダーの奥まで慎重に押し込み、ヘッドとメインハンドルを回し締める。
- ・ガラス球をアルコールで清拭してから取付けること。
- ・キセノン電球は 20 時間の使用を目安とし、出力状態を確認して適宜交換すること。
- ・LED 電球の寿命は約 100,000 時間です。
- ・指定の交換用電球のみを使用すること。

【点検】

- ・使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- ・使用前に、正常に点灯することを確認すること。
- ・正常に点灯しない場合は、電池と電球を点検する。
- ・常に予備電球、電池を備えておくことを推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：LUXAMED GmbH & CO. KG（ラクサメッド社）
製造国：ドイツ