

プレスエスティック CAD WAX

*【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り
融点：100～120℃



製品コード	色調	直径	厚み
10010-20	Deep	98.5mm	20mm
10008-20	Bleach		

- 原材料
ポリエチレンワックス(合成ワックス)、着色材
- 包装
1 個 / 包

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴物修復物のろう型作製の
のキャスティングワックスをいう。

【使用方法等】

- 本品をミリングマシンにセットする。
- ミリングマシンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ
等の鑄型用ろう型を製作する。（操作はミリングマシンの
マニュアルに準ずる）
- 製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん
酸塩系）で埋没し、リングファーンズで焼却処理を行う。

【使用上の注意】

- 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しない
こと。
- 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注
意すること。
- クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高い
ものを使用すること。（またパターン同士の間隔は十分に取
ること）
- 再溶解して使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 25℃以下の環境で保管すること。
- 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場
所、車両内など）に放置しないこと。
- 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保
管しないこと。
- 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期
限は自己認証[製造所データ]による。）
（例：20YY-MM-DD は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す。）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Harvest Dental LLC
（ハーベストデンタル社）
製造国：アメリカ合衆国