

**2021 年 12 月改訂（第 3 版）

*2020 年 9 月作成（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001316

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストینگワックス JMDN コード：16189000

プレスエスティック CAD WAX

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

融点：100～120℃



製品コード	色調	直径	厚み
10010-20	Deep	98.5mm	20mm
10008-20	Bleach		

2. 原材料

ポリエチレンワックス(合成ワックス)、着色剤

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴物修復物のろう型作製用のキャストینگワックスをいう。

【使用方法等】

- 1) 本品をミリングマシンにセットする。
- 2) ミリングマシンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ等の鑄型用ろう型を製作する。（操作はミリングマシンのマニュアルに準ずる）
- 3) 製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん酸塩系）で埋没し、リングファーネスで焼却処理を行う。

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 3) クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。（またパターン同士の間隔は十分に取ること）
- 4) 再溶解して使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 25℃以下の環境で保管すること。
- 2) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
- 3) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Harvest Dental Products, LLC

（ハーベストデンタルプロダクツ社）

製造国：アメリカ合衆国