

再使用禁止

## ポストクリナーブラシ

### \*【禁忌・禁止】

1. ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

外観写真は以下のとおり

CA用



ソフト



ハード

#### 2. 原材料

軸部: 真鍮(ニッケルコーティング)  
ブラシ部: ナイロン

#### 3. 包装

100本 / 箱

### 【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃及び研磨に用いる回転式歯科用器具である。

### 【使用方法等】

#### [使用方法]

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 歯の清掃及び研磨を行う。  
※最大回転数: 800rpm

#### [使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- 2) 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 5) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 6) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。
- 7) 使用に際しては無理な力を加えないこと。(無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある)
- 8) 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。

### 【使用上の注意】

- 1) ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保管・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル  
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号: 076-278-8800