

SS White グレートホワイトラバー

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

HP 用		最大径Φ/作業部全長 単位：mm	
タイプ	商品番号	最大径Φ/ 作業部全長	最大回転数 (rpm)
DF シリーズ	GW261-023DF-4	2.3/11.5	40,000
	GW79-040DF-4	4.0/13.0	30,000
E シリーズ	GW71-040E-4	4.0/3.5	30,000
	GW77-023E-4	2.3/5.5	40,000
	GW78-060E-4	6.0/12.0	20,000
	GW79-040E-4	4.0/13.0	30,000
	GW251-060E-4	6.0/14.0	20,000
	GW257-060RE-4	6.0/14.0	
	GW261-023E-4	2.3/11.5	40,000
	GW79-045E-4	4.5/13.0	30,000
	GW79-060E-4	6.0/14.0	20,000
	GW72-060E-4	6.0/13.0	
	GW79-050E-4	5.0/13.0	30,000
	GW251-070E-4	7.0/14.0	20,000
	GW364-023E-4	2.3/15.0	40,000
	GW71-014E-4	1.4/1.25	
EF シリーズ	GW79-040EF-4	4.0/13.0	30,000
	GW79-060EF-4	6.0/14.0	20,000
	GW251-060EF-4	6.0/14.0	
	GW257-060EF-4	6.0/14.0	
EUF シリーズ	GW139-023EUF-4	2.3/8.0	40,000
FSQ シリーズ	GW79-040FSQ-4	4.0/13.0	30,000
	GW79-070FSQ-4	7.0/14.0	20,000
	GW251-060FSQ-4	6.0/14.0	20,000
G シリーズ	GW79-045G-4	4.5/13.0	30,000
	GW251-060G-4	6.0/14.0	20,000
	GW79-070G-4	7.0/14.0	
GE シリーズ	GW79-045GE-4	4.5/13.0	30,000
	GW251-060GE-4	6.0/14.0	20,000
	GW79-070GE-4	7.0/14.0	
GSQ シリーズ	GW261-023GSQ-4	2.3/11.5	40,000
	GW351-060GSQ-4	6.0/13.0	20,000
	GW251-060GSQ-4	6.0/14.0	
	GW351-070GSQ-4	7.0/13.0	
M シリーズ	GW251-060M-4	6.0/14.0	20,000
	GW257-023M-4	2.3/15.0	40,000
Q シリーズ	GW251-060Q-4	6.0/14.0	20,000
UM シリーズ	GW251-040UM-4	4.0/9.0	30,000

2. 原材料

〔作業部〕

- ・ タングステンカーバイド（ジルコニウムコーティング）

〔シャンク〕

- ・ ステンレススチール

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品を歯科用電気駆動装置に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 歯科用電気駆動装置に装着し、回転させ、断続的に被研削物に押し付けて、研削・研磨する。
- 2) 必要であれば滅菌を行う。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程も含む 135℃以下厳守。）

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 安全のために、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテグを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 4) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 過酸化水素と接触させないこと。
3. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
4. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1 - 9 - 1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SS White Burs, Inc. （エスエスホワイト社）

製造国：アメリカ合衆国