

歯科材料 (09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDN コード：70744000

サポートピンリムーバー

【禁忌・禁止】

1. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
2. 本品の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り
先端部形状：ラジアス



先端径	刃長	ネック長	全長	シャンク径
φ1.0	11.5	18.0	55.0	φ2.35

(サイズ単位：mm)

- ・推奨回転数：12,000～35,000rpm

2. 原材料

刃部：タングステンカーバイド
シャンク部：タングステンカーバイド

3. 包装

1 本 / ケース

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科用電気駆動装置に装着し、ワックス、プラスチック、セラミック、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 歯科用電気駆動装置に装着し、回転させ、断続的に被研削物に押し付けて、研削・研磨する。
- 2) 必要であればオートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度(乾燥温度も含む) 134℃以下厳守】。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・推奨回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避ける

ため、局所吸塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 4) 本品に損傷、変形(ひび、割れ、曲がり)等があるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

1. 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 過酸化水素と接触させないこと。
3. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
4. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800