

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

フォグフリーフォト

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



Fog-Free Kit




BR190811



BR190608



BR190504

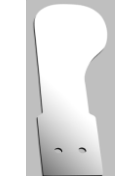

BR190603

2. 原材料

本体：ポリカーボネート
ミラー：ステンレススチール

3. 包装

キット：1 セット / 箱
（本体、ミラーL (BR190608)、充電用 USB ケーブル）
替ミラー：1 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前にミラーが滅菌済みかを確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 135℃。）
- 2) 本品裏側にあるスロットにミラーを差し込む。
- 3) 「①」を押すと、曇り止めの送風が開始される。長押しで停止する。



- 4) 必要に応じ、「②」を押してライトを点灯させる。長押しで消灯する。
- 5) 使用後はミラーを取り外し、本体表面を非アルコール消毒剤で拭き取り保管する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

4) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 135℃】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Guangdong Xianfeng Precision Metal Product Co., Ltd.

（グアンドン シャンフェン プレシジョン メタル プロダクト社）

製造国：中華人民共和国