

再使用禁止

Tru ベース LABO

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 適切な術前診断、治療計画を行ったうえで、メーカーの指定する器具などを使用すること。
3. 口腔内で使用しないこと。
4. ワックスアップ接触箇所以外にはサンドブラスト処理は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

Engaging (※: Non-Engaging タイプあり)

対応タイプ	製品名	
	3.5 mm	5.5 mm
Camlog	CamLog 3.3	
	CamLog 3.8	
	CamLog 4.3	
	CamLog 5.0	
	ConeLog 3.3	
	ConeLog 3.8	
	ConeLog 4.3	
	ConeLog 5.0	
Dentium Bone Level※	Dentium SuperLine Regular	
Dentsply Sirona※	Astra Tech OsseoSpeed EV 3.0	
	Astra Tech OsseoSpeed EV 3.6	
	Astra Tech OsseoSpeed EV 4.2	
	Astra Tech OsseoSpeed EV 4.8	
	Astra Tech OsseoSpeed EV 5.4	
Dentsply Sirona	Astra Tech OsseoSpeed TX 3.0	
	Astra Tech OsseoSpeed TX 3.5/4.0	
	Astra Tech OsseoSpeed TX 4.5/5.0	
Dio UF (Ⅱ)	Dio UF(Ⅱ) Narrow	
Hiossen/Osstem Bone Level※	Hiossen/Osstem ET Ⅱ/ET Ⅲ Mini	
	Hiossen/Osstem ET Ⅱ/ET Ⅲ Regular	
MegaGen Bone Level	MegaGen AnyOne Mini	
MegaGen Bone Level※	MegaGen AnyRidge	
Neoss	ProActive Straight 3.25	
	ProActive Straight 3.5/4.0/4.5/5.0/5.5	
Nobel Biocare※	NobelActive NP	
	NobelActive RP	
	NobelActive WP	
Nobel Biocare	NobelReplace/Select NP	
	NobelReplace/Select RP	
	NobelReplace/Select WP	
Straumann Bone Level※	Straumann SC	
	Straumann NC	
	Straumann RC	
Straumann Tissue Level	Straumann synOcta RN	
	Straumann synOcta WN	
Zimmer Biomet	3i Certain 3.4	
	3i Certain 4.1	
	3i Certain 5.0	
Zimmer Biomet※	Zimmer Screw Vent 3.5	
	Zimmer Screw Vent 4.5	
	Zimmer Screw Vent 5.7	
Non-Engaging/Unigrip	Nobel Multi-Unit RP [Short]	
	Nobel Multi-Unit RP [Long]	

2. 原材料

チタン合金 (Ti-6Al-4V ELi)

3. 包装

チタンベース 1 個、スクリュー 2 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 専用システムで作成したインプラント施術計画に従って、使用するインプラントに対応する本品を選択する。
- 2) 適切な前加工、前処理を行い、作業模型のインプラントラポアナログに付属のスクリューを用いて本品を取り付ける。
- 3) 本品の上に目的に応じた形態のワックスアップを行う。
- 4) 歯科用 CAD システムでスキャニングを行い、ワックスアップの形態に応じた素材加工を CAM システムにて行う。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。(著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。)破損する恐れがある。
- 2) 過剰な外圧をかけないこと。
- 3) 使用者は、本製品の使用に際し、予め手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はインプラントの知識を有する歯科医師の指導・指示のもと、作業、操作を行うこと。
- 2) 回転防止対策等による加工は強度減少の恐れがあるため、最小限の加工にとどめること。
- 3) マージンカラー部を大きくはみ出したり、カラー部基底面より下方に位置するワックスアップは行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：TruAbutment, Inc.

(トゥルーアバットメント社)

製造国：アメリカ合衆国