

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ JMDN コード：70179000

再使用禁止（ディスポーザブルカバー）

フリーキヤム

【警告】

1. 必ず専用のディスポーザブルカバーを取り付けて使用すること。
2. 使用中、患者が本品を強く噛まないように注意すること。


【禁忌・禁止】

1. ディスポーザブルカバーは再使用禁止。
2. 器具の形態変更や改造はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

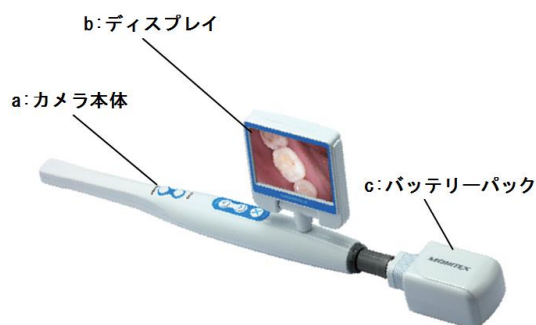

2. 仕様

サイズ	カメラ本体	235mm (L) × 27mm (W) × 27mm (H) 51g
	ディスプレイ	90mm (L) × 63mm (W) × 16mm (H) 42g
解像度	300,000 pixel	
焦点距離	4 mm～35 mm	
光源	ホワイト LED × 6	
ディスプレイ画面	2.5 インチ TFT 液晶	
電圧	AC 100～240V	
周波数	50/60 Hz	

3. 包装

1 セット / 包

セット内容：カメラ本体、ディスプレイ、バッテリーパック、MicroSD カード、USB SD カードリーダー、SD カード変換アダプター、ディスポーザブルカバー（50 枚）、充電用アダプター

【使用目的又は効果】

本品は口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用するために用いる。

【使用方法】

[使用前の準備]

- 1) 取扱説明書をよく読むこと。
- 2) コードレスで使用する場合、使用前に十分な充電を行うこと。（充電が完了すると、充電用アダプターのランプが緑になる）
- 3) バッテリーパックとカメラ本体の矢印部分を合わせ差し込む。
[右図 1 参照]



[図 1]

- 4) カメラ本体にディスプレイを接続する。
- 5) MicroSD カードを挿入する。
- 6) ディスポーザブルカバーを被せる。

[使用方法]

- 1) バッテリーパック[図 2]の電源スイッチを入れ、カメラ本体[図 3]の電源ボタンを押し、起動するまでしばらく待つ。
- 2) ディスプレイが起動したのを確認し、患者の口腔内に挿入する。必要に応じディスプレイ背面の画像調節ボタン[図 4]で、画像調節を行う。画像調節ボタンを押すと下記の表順に調節が切り替わる。

①明るさ	⑤シャープネス
②コントラスト	⑥リセット
③色相	⑦終了
④彩度	


- 3) カメラ本体[図 3]の画像停止ボタンを押し、画像保存ボタンで MicroSD カードに撮影した画像を保存する。（MicroSD カードに保存した画像を見るには、画像スクロールボタンを押し、消去したい場合は画像消去ボタンを押す。）
- 4) 使用後、カメラ本体[図 3]の電源ボタンを長押しし休止モードにし、バッテリーパックの電源スイッチを切る。

[図 2]

アダプター接続部 電源スイッチ



[図 3]

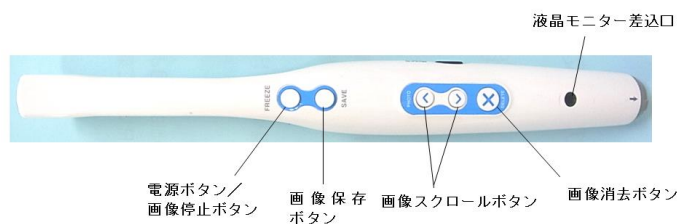

[図 4]

画像調節ボタン 画像反転ボタン 画像調節スクロール



[使用環境]

室温 0℃～50℃の結露のない環境

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

1. 目を損傷させる恐れがあるので、光源を患者の目に照射しないこと。また、直視しないこと。
2. 本品の LED 照明を患者の目に照射しないこと。また直視しないこと。
3. 水のかからない場所に設置すること。また気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
4. 引火性のものや爆発物の近くに置かないこと。
5. 直射日光、火気、またはストーブの近くなど、高温になる場所での使用や放置はしないこと。
6. 漏電や損傷を防ぐ為、金属性もしくは水分を含んだものに接続口が触れないようにすること。
7. コントロールパネル、もしくはハンドピース表面にシミや汚れがある場合は、乾燥したやわらかい布で拭き取る。汚れが取れない場合には、中性洗剤もしくは弱酸性洗剤で拭き取る。
8. 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
9. オートクレーブ等による滅菌処理をしないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 水のかからない場所に保管すること。
- 2) 気圧、温度、湿度風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 4) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
- 3) 故障した場合は、直ちに製造販売元若しくは販売元へ連絡を行い修理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：MONITEX INDUSTRIAL CO.,LTD
製造国：台湾