

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

アトリアミラーホルダー

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 本品に感作やアレルギー反応を示す可能性のある患者には使用しないこと。〔ニッケルを含むため。〕

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観写真は以下の通り



全長：146.3 mm
ハンドル径：8.1mm

タイプ	色調
International SS (Europe type)	ブルー
Japan SS	グリーン

2. 原材料

ハンドル部：ナイロン

接続部：真鍮（ニッケルメッキ）

3. 包装

10 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内で歯等を見る為のミラーヘッドを保持するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下。）
- 2) 本品を鏡と確実に接合させ、これを把持して使用する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) ニッケルに対するアレルギーのある患者には使用しないこと。
- 3) 器具に対して、形状変更等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 4) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

・使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Atria Co.（アトリア社）

製造国：大韓民国