

再使用禁止

リセラディスポミラー

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



【各部寸法】

ミラー部 外径 / 内径	全長
24mm / 20.1mm	166mm

2. 原材料
ガラス、PP、着色剤
3. 包装
10 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

口腔内にて反射鏡として使用する。

【使用上の注意】

- 1) 本品の使用はディスポーザブルとし、再使用を禁止する。
- 2) 本品は滅菌品であるため、再滅菌しないこと。
- 3) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 4) 本品は、過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折する事があるので注意すること。
- 5) ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用前に、磨き粉、金属ウール、金属ブラシなどで表面を磨かないこと。曇った場合は柔らかい布などで拭くこと。
- 6) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいないこと。
- 7) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒートリングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 水濡れに注意し、高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 破損及び破折の恐れがあるので、重量のある器具などと一緒に保管しないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【使用期限】

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
(20YY. MM. DD は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す)

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800