

耳鼻吸引管 AR

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形状変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観写真は以下のとおり



製品コード	先端外径	全長
09-025-1	1.9 mm	140 mm
09-025-2	2.4 mm	
09-025-3	2.9 mm	
09-025-4	3.5 mm	

2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は支持する器具である。汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みかを確認すること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 135℃)
- 2) 本品接続部に、吸引チューブ、吸引配管または電動式吸引器等を接続し使用する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒートテグを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中は、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

- ・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- ※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは、錆びやキズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

2. 滅菌

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む 135℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

3. その他

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆びや変色の原因となることがある。
- 4. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 歯愛メディカル

住所:石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号:076-278-8800

製造業者: AR Instrumed (エーアールインストルメッド)

製造国: パキスタン