

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN コード：70903000

## ZIR グロス

### 【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造  
以下の通り  
CA 用

|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 形状    |  |  |  |
| 製品コード | ZIR9861M                                                                          | ZIR9863M                                                                          | ZIR9863F                                                                          |
| タイプ   | ミディアム                                                                             |                                                                                   | ファイン                                                                              |

#### HP 用

|       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 形状    |    |    |    |
| 製品コード | ZIR9866M                                                                            | ZIR9867M                                                                            | ZIR9868M                                                                            |
| タイプ   | ミディアム                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| 形状    |  |  |  |
| 製品コード | ZIR9866F                                                                            | ZIR9867F                                                                            | ZIR9868F                                                                            |
| タイプ   | ファイン                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |

- 原材料  
作業部：ポリウレタン、ダイヤモンド砥粒、二酸化ケイ素  
シャंक部：ステンレススチール

- 包装  
単品  
各 2 本 / 包

#### キット

チェアサイドキット 1 セット[CA 用 3 種] / 包  
ラボキット 1 セット[HP 用 6 種] / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は、ゴム系の基材に、ダイヤモンド砥粒を研磨材として用いた歯科用研磨材である。

### 【使用方法等】

- 歯科用電気駆動装置等に装着し口腔外で回転させ、振れがないことを確認する。
- 振れがなければ、研削、研磨する。

| 製品コード    | 推奨回転数            | 最大回転数     |
|----------|------------------|-----------|
| ZIR9861M | 7,000～12,000rpm  | 20,000rpm |
| ZIR9863M | 10,000～12,000rpm | 15,000rpm |
| ZIR9863F |                  |           |
| ZIR9866M | 7,000～12,000rpm  | 20,000rpm |
| ZIR9866F |                  |           |
| ZIR9867M |                  |           |
| ZIR9867F |                  |           |
| ZIR9868M |                  | 15,000rpm |
| ZIR9868F |                  |           |

### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
- 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

### 【使用上の注意】

- 本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

### 4. 洗浄について

#### 【洗浄】

- 使用後は防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ワールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

#### 【その他】

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保管・点検に係る事項】

使用前使用後は破損。ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：JOTA AG  
（ジョタ エージー社）  
製造国：スイス