

機械器具（58）整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード：70757000  
（一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDN コード：70887000）

再使用禁止

DESS スキャンアバットメント IOS

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造

| 製品名                              | 製品コード  |
|----------------------------------|--------|
| 3I CERTAIN NP 3.4                | 52.014 |
| 3I CERTAIN RP 4.1                | 52.015 |
| 3I CERTAIN WP 5.0                | 52.016 |
| 3I OSSEOTITE NP 3.4              | 52.011 |
| 3I OSSEOTITE RP 4.1              | 52.012 |
| 3I OSSEOTITE WP 5.0              | 52.013 |
| ASTRA OSSEOSPEED UNIABUTMENT 20° | 52.036 |
| ASTRA OSSEOSPEED UNIABUTMENT 45° | 52.037 |
| ASTRA OSSEOSPEED RP 3.5-4.0      | 52.024 |
| ASTRA OSSEOSPEED WP 4.5-5.0      | 52.025 |
| ASTRA TECH EV 3.6                | 52.059 |
| ASTRA TECH EV 4.2                | 52.060 |
| ASTRA TECH EV 4.8                | 52.061 |
| ASTRA TECH EV UNIABUTMENT        | 52.058 |
| MULTI-UNIT RP 4.8                | 52.007 |
| MULTI-UNIT WP 6.5                | 52.047 |
| NOBEL ACTIVE NP 3.5              | 52.041 |
| NOBEL ACTIVE RP 4.3              | 52.042 |
| NOBEL BRANEMARK NP 3.5           | 52.001 |
| NOBEL BRANEMARK RP 4.1           | 52.002 |
| NOBEL BRANEMARK WP 5.1           | 52.003 |
| NOBEL REPLACE SELECT NP 3.5      | 52.004 |
| NOBEL REPLACE SELECT RP 4.3      | 52.005 |
| NOBEL REPLACE SELECT WP 5.0      | 52.006 |
| STRAUMANN BONE LEVEL NP/RP       | 52.098 |
| STRAUMANN BONE LEVEL NP 3.3      | 52.043 |
| STRAUMANN BONE LEVEL RP 4.1      | 52.044 |
| STRAUMANN TISSUE LEVEL RN 4.8    | 52.009 |
| STRAUMANN TISSUE LEVEL WP 6.5    | 52.045 |
| STRAUMANN BLX RB/WB              | 52.062 |
| Xive NP 3.4                      | 52.038 |
| Xive RP 3.8                      | 52.039 |
| Xive WP 4.5                      | 52.040 |
| ZIMMER SCREW-VENT NP 3.5         | 52.017 |
| ZIMMER SCREW-VENT RP 4.5         | 52.018 |
| ZIMMER SCREW-VENT WP 5.7         | 52.019 |

2. 原材料

チタン合金、ピーク、ZrN コーティング

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を歯科用 CAD/CAM システムで製作するため、デジタル印象採得を行う器具である。

【使用方法等】

【使用前の準備】

1. 口腔内に埋植されたインプラント体の種類に対応する本品を選択する。
2. 使用する歯科用 CAD/CAM システムの CAD ソフトウェア内のスキャンボディ（スキャンアバットメント）ライブラリに、各メーカーが存在しているか確認すること。
3. 口腔内で使用する際は、本品が滅菌されているかを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。121℃で 30 分間。乾燥工程可。）

【使用方法】

1. 口腔内に植立されたインプラント体に本品を装着・固定する。
2. 装着した本品及び、インプラント体周辺のデジタル印象採得を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 本品を口腔内で使用する場合は、誤飲させないように十分に注意すること。
2. 本品に過度な力をかけるなどの、衝撃を与えないこと。
3. 使用する歯科用 CAD/CAM システムの操作方法に従いデジタル印象採得をし、印象状況に不具合がないか画像状態の確認を必ず行うこと。
4. 本品はスチーマー洗浄しないこと。
5. 表面に汚れ等が付着した場合は水でぬらした柔らかい布でやさしく拭くこと。
6. 使用する歯科用 CAD/CAM システムによっては使用方法の順序が違う場合があるが、システムの使用手順（マニュアル）にあわせて使用すること。

【使用上の注意】

1. 口腔内での使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 本品の形状変更、改造は絶対にしないこと。
3. 本品に異常・変形・破損等が認められる場合は、すぐに使用を中止し新しいものと交換すること。
4. 併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方法に準じて作業すること。
5. オートクレーブ滅菌可。[121℃で 30 分間。乾燥工程可。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を長期間使用しなかった場合、使用前に正常に機能することを確認してから使用すること。
2. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Terrats Medical, S.L. （テラッツ メディカル社）  
製造国：スペイン