

機械器具 (60) 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用トリマ JMDNコード: 70741000

モデルトリマーSQ148L

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造 下記の通り



【仕様】

本体寸法 (mm)	W300 x H300 x D400
重量	18.5 Kg
電源電圧	100/110V AC 50-60 Hz
消費電力	750W
ディスク	外径: φ254mm 厚さ: 6.5mm
回転数	2,800~3,325 rpm

2. 包装

1セット / 包

セット内容: 本体、ベークライトディスク、給水ホース、排水ホース、電源コード

【使用目的又は効果】

歯科技工において石膏模型を切削するために用いる。

【使用方法等】

【使用前の準備・設置】

- 1) 使用前に取扱説明書をよく読むこと。
- 2) 本体を水平で安定したシンクに近い場所に設置する。
- 3) 給水ホースを本体と蛇口にしっかり装着する。
- 4) 排水ホースを取付け、シンク内の排水口に降ろす。
- 5) 電源コードを本体と電源コンセントに接続する。

【使用方法】

- 1) 作業台調整ノブを回して、作業台の角度を調節し、ロックノブを回して固定させる。
- 2) 電源スイッチを押してディスクを回転させる。
- 3) 水量調整レバーで流量を適切に調節する。
- 4) 作業台に石膏模型を置き、手でしっかり押さえて、ディスクに軽く押し付けながら切削を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 換気の良い場所で使用すること。
- 2) 機器から排出される水を処理できる場所で使用すること。
- 3) 回転しているディスクがブレていないかを確認し、切削を行うこと。
- 4) ディスク面に水が供給されていることを確認してから、切削を行うこと。
- 5) 切削の際には過度な加圧をかけないこと。
- 6) 石膏以外のものは絶対に切削しないこと。
- 7) ディスク両面を使用する場合は、片面が薄くならないうちに、表裏交換すること。薄すぎると割れる恐れがある。

【使用上の注意】

- 1) 機器の形態変更や改造などはしないこと。
- 2) 機器に異常が見られた場合は、機器の使用を中止すること。
- 3) 電源コードの接続が正確でかつ安全であることを確認すること。
- 4) 使用時には保護メガネ及びマスクを着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 高温、火気をさけて保管すること。
- 2) 水のかからない場所に保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 4) 気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- 5) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)、落下などに対する安定状態に注意すること。

【耐用期間】

製造出荷後、定規の使用法、保守点検を行った場合に限り5年(自己認証による。)

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書をよく読むこと。

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 暫く使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常に且つ、安全に作動することを確認すること。
- 3) 機器は次回の使用に支障がないよう必ず洗浄・清掃しておくこと。※洗浄・清掃方法の詳細については、取扱説明書のメンテナンスの項を参照すること。
- 4) 異常、故障が見られた場合は製造販売会社の指示に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: SIRIO DENTAL S. R. L.
(シリオデンタル社)
製造国: イタリア