

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード：34655000

再使用禁止

Ci 非固着性ドレッシング

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：WAYSON Medical Co., Ltd.
（ウェイソン メディカル社）
製造国：中華人民共和国

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
サイズ：10×10 cm
- 原材料
創傷適用面：ポリエチレンフィルム
吸収層：ビスコースレーヨン+ポリエステル
外表面：熱間圧延不織布
- 包装
100枚 / 箱

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を保護し、滲出液を吸収するために用いる不織布である。

【使用方法等】

[使用方法]

- 創傷部位及び創傷部周辺の皮膚を清潔にする。
- 本品を無菌袋より取り出す。
- 光沢のある面を創傷面にあて、テープ等で固定する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・包装に開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと。
- ・開封後は直ちに使用すること。
- ・貼付けの際は、必ず本品の表裏を確認すること。外表面は撥水加工をしてあるため、滲出液を吸収しないため。
- ・交換時、本品の創傷面に固着している時は、無理に剥がさず、固着している部分を湿らせ柔らかくしてから剥がすこと。
- ・重度の傷ややけど等には使用しないこと。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・痛み等が生じた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔な場所に保管すること。

[使用期限]

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（※例 20YY-MM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す。）