

機械器具（42）医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 JMDN コード：70683000

BNDクラウンリムーバー

【禁忌・禁止】

- 1) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 2) 器具の形態変更や改造などはしないこと。
- 3) 本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
以下のとおり

[全体図]



[チップ]

形状	タイプ
	W チップ
	T チップ
	S チップ

2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

- ・セット：ハンドル、W/T/S チップ×各 1 本
- ・チップ単品販売：1 本 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。121℃以下厳守)
- 2) 除去する補綴物等に適したチップをハンドルに装着する。
- 3) チップに緩みがないことを確認し、ナットをハンドルの後部に当てて使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用の際は、歯牙へのダメージを避ける為、様子を見ながら徐々に行うこと。
使用中にもチップに緩みがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 2) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・滅菌
[洗浄]
 - ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
 - ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
 - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
[滅菌]
 - ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度 121℃以下厳守】
 - ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
[その他]
 - ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.
(ハンジョウ ジェンシン メディカル アパラス社)
製造国：中華人民共和国