

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN コード：70891000

Zhermack ゼタラボ

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：ペースト状
色調：グレー

構成品

一般的名称	販売名	製造販売届出番号
歯科印象採得用器材	Zhermack 硬化ジェル	17B2X10001001650

2. 原材料

ポリジメチルシロキサン、シリカフィラー、鉱油

3. 仕様

練和時間	30 秒※
操作時間	2 分※
硬化時間	6 分※
ショア A 硬度（1 時間）	80
弾性回復	98%
細線再現性	20 μm
寸法変化（24 時間）	0.25%

※硬化ジェルを使用し、温度 23℃、湿度 50%の環境下。

4. 包装

単品：900 g、2.6 kg、5 kg / 各 1 個
付属品：計量スプーン

セット品：5 kg、硬化ジェル 60ml × 2、計量スプーン / 包

【使用目的又は効果】

本品は、複模型の作製に用いる合成ゴムを主成分とした印象材である。

【使用方法等】

- 1) 本品を、付属の計量スプーンすり切り一杯ずつ必要量取り、手のひらに広げる。
- 2) 広げた本品に、図 1 のように計量スプーンの縁を押し当て型をつける。
- 3) 計量スプーン 1 杯につき図 2 のように、硬化ジェルをチューブから 2 本分注出する。



図 1



図 2

- 4) 繰り返し折りたたむように練り、均一な色になるよう混ぜ合わせる。
- 5) 混ぜ合わせた本品を盛り、硬化を待つ。

【使用上の注意】

1. 他の製品と混用しないこと。
2. 使用中に発疹等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
3. 保護手袋を着用し、皮膚への接触を避けること。誤って皮膚に触れた場合は、石鹸と流水で良く洗うこと。
4. 本品は衣服に付着すると除去できないため、付着しないよう注意すること。
5. 本品を目に入れないように注意すること。万一目に入った場合にはすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温多湿、直射日光を避け、5～27℃で保管すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：ZHERMACK S.p.A

（セルマック社）

製造国：イタリア