

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

Ci 鹿皮ホイール

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記のとおり



タイプ：レーズ用、エンジン用

2. 原材料

鹿皮、綿糸

3. 包装

レーズ用：1 個 / 包

エンジン用：12 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

《レーズ用》

- 1) 本品を歯科技工用電気レーズ等に取り付ける。
- 2) 研磨材を塗布し、補綴物等の研磨を行う。

※最大回転数：3,500rpm

《エンジン用》

- 1) 本品をマンドレル（別売）に確実に装着する。
- 2) 歯科用電動駆動装置に取り付ける。
- 3) 研磨材を塗布し、補綴物等の研磨を行う。

※最大回転数：8,000rpm

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・ 研磨を行う際は、保護眼鏡、防塵マスク等を使用すること。
- ・ 本材を回転器具に取り付ける際は、回転器具のメーカー指示に従って確実に装着すること。
- ・ 使用の際は必ず研磨材を使用すること。

【使用上の注意】

1. 破損、変形等のあるものは使用しないこと。
2. 本品に対して、形状変更等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

粉塵や化学薬品を避け、水のかからない場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800