

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 JMDN コード：11751000
（一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000）

再使用禁止

オーラ エイド

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
パッドサイズ：25 mm×15 mm
50 mm×15 mm
- 原材料
水溶性ポリマー、付着性セルロース、不溶性セルロース、他
- 包装
20 枚（個包装）／ 包

【使用目的又は効果】

口腔内粘膜の創傷を一時的に被覆、保護するために用いる。

【使用方法等】

- 創傷部を消毒液、または生理食塩水で洗浄する。
- 外装を開封し、本品を取り出す。
- 必要に応じてパッドを適当な大きさ、形状にカットする。
- 創傷部の水分をガーゼ等で取り除く。
- 保護フィルムからパッドを剥がし、接着面を創傷部にあわせて貼り付ける。
- 3～5 秒間、軽く押し付ける。
接着が弱い場合は、再度軽く押し付ける。

【使用上の注意】

- 本品の使用中に腫れや過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 12 歳未満の子供には使用しないこと。
- 24 時間以内に貼り替えること。
- 使用前に本品に汚染や損傷がないかを確認し、これらが認められた場合は使用しないこと。
- 創傷部から本品を無理に剥がさないこと。
- 誤飲防止のため、就寝前に本品を取り外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

直射日光や高温多湿を避け、1～35℃の清潔な場所で保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：TBM Corporation
（ティービーエムコーポレーション）
製造国：大韓民国