

**2022 年 8 月改訂（第 3 版）

*2022 年 8 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001001750

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 JMDN コード：11751000
（一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000）

再使用禁止

オーラ エイド

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

パッドサイズ：25 mm×15 mm
50 mm×15 mm

2. 原材料

水溶性ポリマー、付着性セルロース、不溶性セルロース、他

3. 包装

20 枚 / 包

**【使用目的又は効果】

口腔内粘膜の創傷又は術後創傷を一時的に被覆、保護するために用いる。

*【使用方法等】

1. 創面を消毒液、または生理食塩水で洗浄する。
2. 外装を開封し、本品を取り出す。
3. 適当な大きさ、形状にカットする。
4. 創面の水分をガーゼ等で取り除く。
5. 保護フィルムからパッドを剥がし、創面にあわせて貼り付ける。
6. 軽く 5～10 秒押し付ける。
24 時間以内に新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用中に腫れや過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
2. 12 歳未満の子供には使用しないこと。
3. 24 時間以内に貼り替えること。
4. 使用前に本品に汚染や損傷がないかを確認し、これらが認められた場合は使用しないこと。
5. 創傷部から本品を無理に剥がさないこと。
6. 誤飲防止のため、就寝前に本品を取り外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光や高温多湿を避け、1～35℃の清潔な場所で保管すること。

[使用期限]

包装に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：TBM Corporation

（ティービーエムコーポレーション）

製造国：大韓民国