

機械器具（64）歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN コード：31848000

コンタクトプローブ

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記外観写真の通り



深度スケール	2-3-4-5-7-9 mm
	3.5-5.5-8.5-11.5 mm
	3-6-9-12 mm

2. 原材料

ヘキサメチレンアジバミド樹脂

3. 包装

12 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケット深さの測定に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に本品が滅菌済かを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守。）
- 先端部を歯周ポケットに挿入し、深さを測定する。

【使用上の注意】

- 使用前に適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具の形状変更や改造はしないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 無理な角度、過度の圧力をかけて使用すると破折することがあるため注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について
血液、体液等で汚染された器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなるため、使用後は直ちに洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
[洗浄]
・使用後は、精製水を用いて器具に付着した血液、体液等を速やかに除去すること。
・超音波洗浄器を使用すると、先端のマーキングが剥げたり、薄くなる可能性があるため注意すること。
[消毒]
薬液消毒として「グルタールアルデヒド 2%溶液」等に浸漬すること。薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に記載された用法・容量に従うこと。
[滅菌]
オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、135℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800