

機械器具（42）医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 JMDN コード：70683000

ルートスプリンターフォーセップス

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 原材料

ステンレス鋼

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

根管内に残存するリーマ、ファイル、ペーパーポイント等の除去に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に本品が滅菌済みかを確認すること。
オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。
- ハンドル部を開閉し、破折リーマやペーパーポイント等を除去する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、機器の使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆びる）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前使用後は、破損やキズ等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

使用後は柔らかいブラシ等を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分の水量で洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるため使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

〔滅菌〕

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- 洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食（錆びる）ことがある。
- 洗浄、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Atria Co.（アトリア社）

製造国：大韓民国