

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN コード：35531000

再使用禁止

C i 眼科ドレープ（受水袋付き）

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

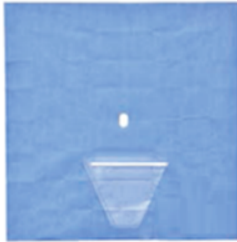

2. 原材料

ドレープ部：SMS 不織布

テープ部：ポリエステルフィルム、接着剤

パウチ部：ポリエチレン、鉄（ワイヤー部）

3. 包装

1 枚 / 包

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから患者を保護するために使用することもある。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないことを確認する。
- 滅菌包装を開封し、無菌操作で本品を取り出す。
- 使用目的の部位・場所を消毒し、術部周辺を覆う。

【使用上の注意】

- 包装の破損や製品の異常が認められた場合は、使用しないこと。
- 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
- 粘着テープをはがす際は、皮膚に負担をかけないようにゆっくりとはがすこと。
- 本品の使用により皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し適切な処置をすること。
- 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

直射日光、水漏れ、高温、多湿の環境を避け、涼しい場所で保管すること。

〔有効期間〕

包装に記載の使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）