

機械器具（25） 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000
 （一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDNコード：37434000）

再使用禁止(サクシオンミラー) **リセラ サクシオンミラー**

【禁忌・禁止】
 再使用禁止(サクシオンミラー)。


【形状、構造及び原理等】

1. 外観

[サクシオンミラー]



[チューブセット]

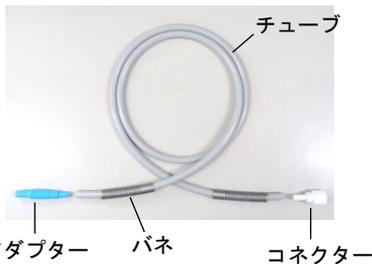

2. 原材料

[サクシオンミラー]

ミラー部	ポリカーボネートガラス
把持部	ABS樹脂

[チューブセット]

チューブ	シリカゲル
アダプター	ABS樹脂
コネクター	ABS樹脂
バネ	ステンレススチール

3. 包装

サクシオンミラー100本 + チューブセット / 箱
 チューブセット / 包


【使用目的又は効果】

口腔内診査を行うとともに、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は単回使用である。


【使用方法等】

- 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認する。
- 滅菌包装を開封し、無菌的に本品を取り出す。
- チューブの両端にバネを通す。

- チューブの端にアダプターを押し込む。必要に応じてコネクター①、コネクター②を取り付け、歯科用吸引装置の挿し込み口に接続する。下図参照。

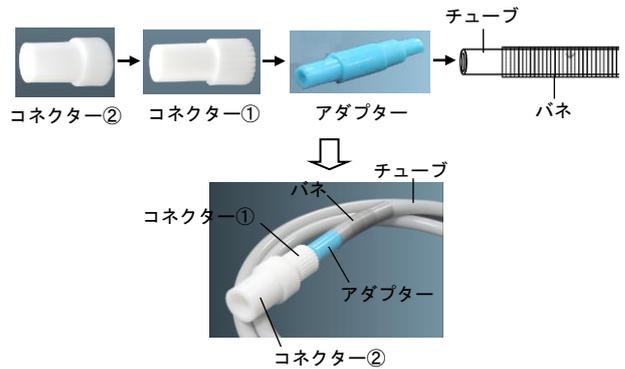

- もう一方のチューブの端にコネクター③を差し込む。下図参照。

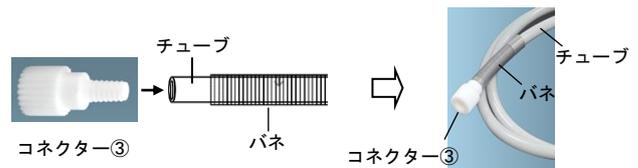

5. のコネクター③とミラーを接続する。
- ミラーのハンドル部を把持し、吸引を行いながら口腔内を診査する。

【使用方法等に関する使用上の注意】

- ・汚染に十分注意して、本品を包装から取り出すこと。
- ・接続するコネクター等をしっかりと接続すること。

【使用上の注意】

- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 子供等の診察・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。
- 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本品に対する曲げ・切削・加圧等
 - ②粗雑な扱い（キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等）
- チューブは再使用可能なため、薬液滅菌を行うこと。（オートクレーブ滅菌不可。）
- 廃棄の際は、感染防止に留意し関連法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

〔使用期限〕

包装に記載の使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食又はミラー部の曇り等がないか点検すること。これらが確認された場合は使用しないこと。

2. 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・ 使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

チューブセットは再使用可能なため、薬液滅菌を行うこと。
(オートクレーブ滅菌不可。)

〔その他〕

- ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800