

ユニバーサルアタッチメント UAD-49

**【禁忌・禁止】

使用方法


本品は、あらかじめ滅菌されていない。初めて使用する場合は、用途に適したレベルの消毒、滅菌を行うこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成ユニット

(1)ユニバーサルアタッチメント UAD-49 1個

2. 各部の名称

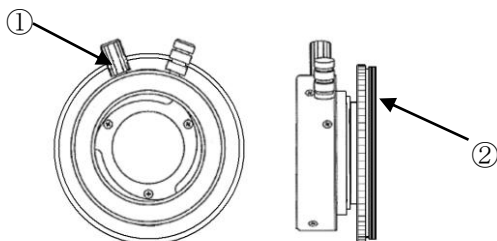

①内視鏡固定ツマミ

②φ49 アダプターリング

3. 仕様

項 目	仕 様
接続口径ネジ	M49×0.75mm
外形寸法	φ49×19.5mm
質量	50g

〈作動・動作原理〉

内視鏡の映像をφ49アダプターリングを介してカメラで撮影する。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡とカメラを組み合わせるために使用することを目的とする。

**【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 機器の準備

- 1) 本品が適切な方法で消毒または滅菌されていることを確認する。
- 2) 本品に傷、凹み、構成部品の緩み・落脱の異常等が無いことを確認する。

3) 本品をカメラに接続する。

4) 内視鏡の接眼部分に本品を接続する。

2. 使用後

- 1) 使用終了後直ぐに本品を取り外し、洗浄を行う。
- 2) 本品を消毒または滅菌し保管する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ・使用終了後直ぐに本品の洗浄を行うこと。付着した粘液、血液等が凝固・固着すると消毒・滅菌効果が低下するばかりか故障の原因となるので、十分洗浄を行い、水切りを完全にしてから消毒・滅菌すること。
- ・廃棄する場合は、地域の法規制に従って廃棄すること。感染症に該当するかについては、使用状態により判断すること。

**【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品は未消毒・未滅菌なので、必ず適切な方法で使用前に消毒または滅菌すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

高温、多湿、ホコリがある所に保管しないこと。

〈耐用期間〉

耐用期間は適切な保守点検を行い、正しく使用した場合、納入後6年間とする。〈自己認証(自社データ)による〉

〈不具合・有害事象〉

〈不具合〉

破損、故障

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄・消毒・滅菌の注意〉

1. 本品の洗浄は必ず1回の使用終了後毎に実施すること。
2. エチレンオキサイドガス滅菌後に残留するガスは、人体に有害です。必ずエアレーションを行うこと。

〈洗浄方法〉

1. 本品全体を中性洗剤に浸漬させ、スポンジ等で洗浄する。
2. 流水で洗浄液が残留しないよう十分に洗い流す。

〈薬液消毒方法医予備条件〉

フタラール系薬液へ浸漬させる。

使用濃度：原液

作用時間：5 分以上

〈滅菌方法及び滅菌条件またはメーカー名〉

＜オートクレーブ滅菌＞

温度：130℃または 135℃ 時間:5 分～20 分

＜エチレンオキシドガス滅菌＞

ガスの種類：EOG20% CO₂80%

ガス濃度：400mg/L 以上

温度：50℃ 以上

湿度：50%以上

圧力：89Kpa

エアレーション時間：12 時間以上

〈使用者による保守点検事項〉

使用前の点検

- ・ 外観にキズ、凹み等が無いことを確認する。
- ・ 内視鏡固定ツマミが可動することを確認する。

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ニスコ株式会社

電話: 055-241-7534

販売業者（問い合わせ先）：

ニスコ株式会社 大阪営業所

〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津 4-14-26

電話：06-4301-8155 FAX：06-4301-8133