

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器

管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

BD クイックヒール ランセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はランセットを取り付けたスプリングとステンレス製のランセット刃、それを格納するホルダーから構成されている。

本品は滅菌済みのランセットである。

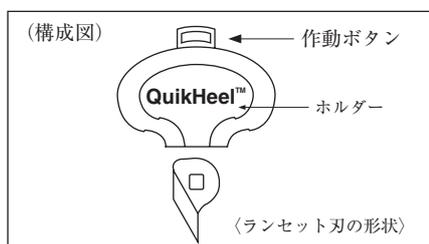

ランセット刃：ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

本品は新生児及び乳幼児の血液検査のためにかかとを穿刺し、微量の血液を採取するための器具である。穿刺後は針が自動的に本体内部へ格納されるため、再使用できず、使用後安全に廃棄できる。

【品目仕様等】

JIS T 3257 の下記項目に適合している。

5.3 せん（穿）刺針の刃先又は刃面


5.4 自動ランセットの設計

5.5 引き抜き強さ

【操作方法又は使用方法等】

1. あらかじめ手袋を着用する。


2. 図1の矢印部分を参考に、踵底部の左右側面の肉厚部分を穿刺部位として選び、消毒する。

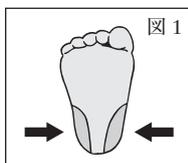

3. 本品のロゴマークを手前に向けて持ち、白い穿刺ボタンを上にし、ホルダー下部を穿刺部位に押し当てる。ホルダーの向きは、踵側面に対して水平にしても垂直にしてもよい。



4. 人差し指で穿刺ボタンをしっかりと押す。
注意：「カチッ」という作動音がするまで確実に押し付け、穿刺部位から離さないこと。[穿刺できないおそれがある。]

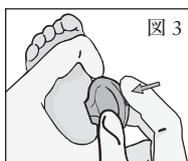

5. すみやかに廃棄容器に廃棄する。

注意：刃の収納が作動しなかった場合は、刃先に注意してすみやかに耐貫通性廃棄容器に廃棄すること。

6. 血液を採取する。



7. 採血後、穿刺部位をガーゼなどで止血し、止血に用いた器材は適切な方法で処理する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- * ● 組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあるため、添付文書上にある穿刺部位を守ること。
- 採血目的以外では使用しないこと。
- 創傷部、粘膜には使用しないこと。
- 感染防止に留意し手袋等の標準予防策をとること。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 本品及び個包装に破損や汚染などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品に過剰な力を加えないこと。[破損のおそれがある。]
- 本品を分解しないこと。
- 個包装を開封したらただちに使用すること。
- 使用方法2～3の過程で作動ボタンを押さないこと。[一度作動したランセットは二度と作動しない。]
- 使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。[血液を介して感染する可能性がある。]
- 傷口が治りにくいときは、医師の指示を受けること。
- 踵部以外に使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管すること。
子供の手の届かない場所に保管すること。

〈使用期限〉

箱に表示

【包装】

1箱50個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

TEL：0120-8555-90 (BDお客様情報センター)

外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー

(Becton, Dickinson and Company)

国名：アメリカ合衆国

