

機械器具 7 内臓機能代用器
管理医療機器 血液回路用チューブ接続用コネクタ 70545102
コネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

再使用禁止

再滅菌禁止

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 : 平和物産株式会社
住 所 : 東京都千代田区丸の内 2-2-1
電 話 番 号 : 03-3287-0731
製 造 業 者 : 三矢メディカル株式会社

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、ポリ塩化ビニル (可塑剤 : フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)) を使用している。本品は、医療用チューブを接続するコネクターであり、コネクターの形状には、ストレート型 (図 1) と分岐型 (図 2) があり、又それぞれにルア・ロック接続部を有する (図 3、図 4) ものものもある。

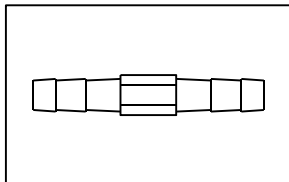


図 1

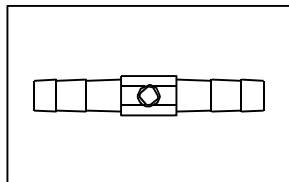


図 3

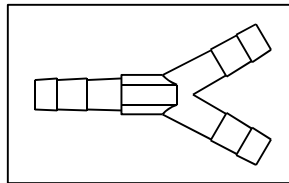


図 2

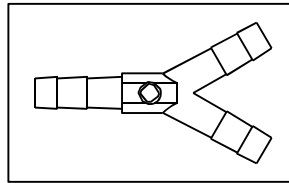


図 4

2. 動作原理

滅菌済みの医療用チューブ同士を連結するために接続するコネクターである。

【使用方法等】

チューブが外れることの無いようにコネクターの根元までしっかり接続する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品にハロゲン化炭化水素性麻酔剤やアルコール・エーテル等の有機溶剤を使用しないこと。又、他に使用する際も本品に接触しないように注意すること。
2. 本品は可塑剤であるフタル酸ジ - 2 - エチルヘキシルが溶出する恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法 :

高温多湿や直射日光を避けること。

2. 有効期間 :

滅菌後 3 年 [自己認証 (当社データ) による]
被包ラベル内 “ 使用期限 ” に記載