

器80 はり又はきゅう用器具
管理医療機器 滅菌済み鍼 JMDNコード 34175000

スポールバン® W

再使用禁止

【禁忌・禁止】

一度使ったものは再使用しないでください。


※【形状・構造及び原理等】

スポールバンWは、酸化鉄粉末成型板（圧粒子）の中央に小さな穴をあけ、そこからハリ先（鍼長1.1mm，線径0.22mm）を出してテープで固定した鍼治療器具です。

ハリ（円皮鍼）：ステンレス鋼線

酸化鉄粉末成型板（圧粒子）：酸化鉄酸化バリウム

布バンテープ：アクリル系粘着剤を塗付した布

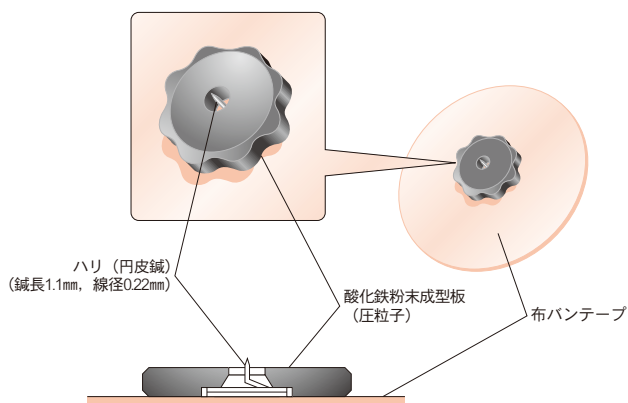

【使用目的、効能又は効果】

鍼治療に使用すること

【品目仕様等】

エチレンオキシドガス滅菌済み

【操作方法又は使用方法等】

1. 皮膚の汚れや汗をふきとり清潔にしてご使用ください。
（できれば、市販の消毒薬で消毒してください。）
- ※ 2. 包装袋を開封し、ハリ先保護材（発泡体）と共に本品を取り出し、離型紙（ライナー）の切込みにそって布バンテープをはがして、ハリ先に触れないようにご使用ください。
3. コリや痛みのあるところを指で押さえ、特に痛みや不快感のある箇所を中心にはってください。
4. 皮膚面に直角に正しくはってください。
5. 2～3日毎に、わずかに場所をずらして、新しいものとはりかえてください。

《使用方法に関連する使用上の注意》

1. 本品は分解しないでください。衛生上の問題、ハリの紛失、小児の誤飲等の原因となります。
2. 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。
- ※ 3. 入浴時は、貼付箇所をタオル等で強くこすらないでください。はがれたりケガの原因になることがあります。入浴後、はがれていないことを確認してください。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意

- ※ 1) アレルギー体質や妊婦の方は使用を避けてください。
 - 2) 傷・湿疹等のある箇所を避けてください。
 - 3) 心臓ペースメーカー等体内植込型医用電子機器を装着している方は、使用しないでください。
- ##### 2. 重要な基本的注意
- 1) 本品は、使い捨て製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないでください。
 - ※ 2) 開封後は無菌状態が保てませんので、使い切るようにしてください。
 - 3) 本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

3. その他の注意

- 1) 使用後はハリがむき出しにならないよう布バンテープを折り中央部を包み、不燃物として廃棄してください。
- ※ 2) 公衆浴場等やプールでは、使用を中止してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

小児の手の届かない所に保管してください。

2. 使用期限

使用期限は外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

【包装】

20本（10本/袋×2袋）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：Ⓢ 祐徳薬品工業株式会社

住 所：〒849-1393

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

T E L：0954-63-1231(代)

製 造 業 者：Ⓢ 祐徳薬品工業株式会社

発 売 元：Ⓜⓓ 日本ドラッグチェーン