

類別 機械器具 05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん

管理医療機器 一般的名称 単回使用麻酔用呼吸回路 \*\* JMDNコード 37704000

再使用禁止 販売名 \*\* ウエストメド麻酔用回路 (回路、バクテリアフィルタ)

**【警告】**


**＜使用方法＞**

- ◆使用中は常に患者さんの状態を観察してください。
- ◆使用前に破損・変色・変質等のないことを確認してください。

**【禁忌・禁止】**

**＜使用方法＞**

- ◆可燃性ガスと併用しないでください。
- ◆再使用しないでください。
- ◆洗浄・滅菌しないでください。ガス滅菌をした場合、危険な残留ガスが残ったり、危険なまでに抵抗が増すことがあります。

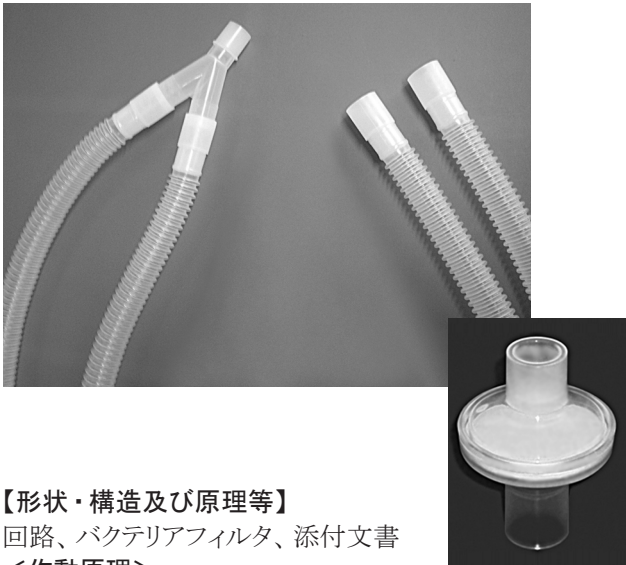

**【形状・構造及び原理等】**

\*\* 回路、バクテリアフィルタ、添付文書  
**＜作動原理＞**

本品自体は作動しません。患者側のYピースにフェースマスクを接続し、他方を麻酔器、又は人工呼吸器の吸気・呼気接続口にそれぞれ接続します。ガス流は、呼吸バッグ、あるいは人工呼吸器によるガス送出動作ならびに患者の呼吸動作に従って、本回路内を通過します。

**\*\*【使用目的又は効果】**

麻酔器又は人工呼吸器と患者の間に接続し、両者間にやりとりされる吸呼気ガスを導くための使い捨ての呼吸回路です。

**\*\*【使用方法等】**

- ①パッケージから回路を取り出してください。
- \*\* ②回路を麻酔器又は人工呼吸器に接続してください。接続部にリークがないことを確認してください。
- ③麻酔器又は人工呼吸器の取扱説明書の記載に従って、始業点検を実施してください。

**【使用上の注意】**

**＜重要な基本的注意＞**

- ◆紫外線にさらされた場合、ダメージを受けることがありますので、紫外線や直射日光に当たらない場所に保管してください。
- ◆ほこり・塩分・イオウ分を含んだ空気等により悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

\*\* ◆ (この項目削除)

**\*\*【保管方法及び有効期間等】**

保管温度：-40～+70℃

保管湿度：10～100% (非結露)

保管場所：暖かい湿気がなく、温度変化の少ない場所に保管

**【保守・点検に係る事項】**

**1. 使用者による保守点検事項**

使用後は廃棄してください。

**＜日常点検＞**

使用前に、外観に傷みのないことを確認してください。

**【主要文献及び文献請求先】**

\*\* アイ・エム・アイ株式会社 レスピラトリ・ケア部

\* TEL：048-968-4442

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名(国名)

製造元：Westmed, Inc. (ウエストメド社) (米国)

製造所：Westmed de Mexico, S.A. de C.V.

(ウエストメド ディメキシコ社) (メキシコ)