

Baxter

機械器具 7. 内臓機能代用器
腹膜灌流用回路及び関連用具セット*

高度管理医療機器*	
承認番号*	20200BZY00463000
JMDNコード*	70592000*

CAPD UVフラッシュセット
(UVフラッシュディスコネクトキット)

再使用禁止

【警告】


UVフラッシュディスコネクトキャップの内部を汚染させないこと [腹膜炎を発症することがある]。

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**

本品はUVフラッシュディスコネクト接続チューブ（以下、「接続チューブ」という）の先端の汚染を防止するためのキットです。本品はUVフラッシュディスコネクトキャップとマスクから構成されています。本品と接続チューブを接続するときにはUVフラッシュオート（以下、「UVフラッシュ」という）を必ず用いて下さい。

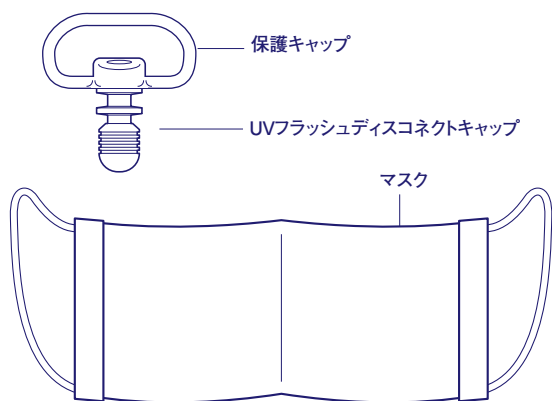

【使用目的】*

慢性腎不全患者の自己連続携行式腹膜透析（CAPD）施行の際の、透析液注排液用ディスポーザブルセットとして使用する。

【操作方法又は使用方法等】**

ご使用の前にUVフラッシュの取扱説明書及びご使用になるシステムに応じた下記取扱説明書又は操作手順書を必ずお読み下さい。

- ・ UVフラッシュツインバッグ操作手順書
- ・ UVフラッシュシステム操作手順書
- ・ UVフラッシュYセットシステム操作手順書
- ・ ホームAPDシステムゆめ取扱説明書

- ・ 本品に変色、ヒビ、変形、劣化、破損があった時は使用しないで下さい。
- ・ UVフラッシュディスコネクトキャップの接続操作は、清潔な環境下で無菌的操作により、行って下さい。
- ・ UVフラッシュディスコネクトキャップに傷、汚れがあるとき、保護キャップが外れているときには本品を使用しないで下さい。

外し方**

1. UVフラッシュディスコネクトキャップが装着された接続チューブをUVフラッシュの左溝にセットします。
2. UVフラッシュ右溝に適切な器材をセットします。
3. UVフラッシュの操作方法に従い接続チューブからUVフラッシュディスコネクトキャップを取り外します。
4. UVフラッシュから本品を取り出し捨てます。

付け方**

1. 本品の包装を開封し、マスクを着用します。
2. UVフラッシュディスコネクトキャップの包装を開封し、UVフラッシュディスコネクトキャップを取り出します。
3. UVフラッシュを開き、左溝に適切な器材をセットします。
4. UVフラッシュ右溝にUVフラッシュディスコネクトキャップをセットし保護キャップをはずします。
5. UVフラッシュのカバーを閉じます。
6. 以降はご使用になるシステムに応じたUVフラッシュの取扱説明書又は操作手順書をご参照ください。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 接続チューブのスパイクの汚染をさけるためUVフラッシュディスコネクトキャップが確実に接続チューブのスパイクを覆っているか確認して下さい。
2. 本品には殺菌消毒剤を使用しないで下さい。
3. UVフラッシュディスコネクトキャップはガンマ線滅菌済みにつき、包装開封後、直ちに1回限りの使用とし、再滅菌、再使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 汚染した可能性のあるUVフラッシュディスクコネクタキャップを使用した場合やUVフラッシュディスクコネクタキャップの接続部から液漏れ、接続部からの抜けが発生した場合は、注排液をせず、すみやかに医療機関に連絡して下さい。
2. 本品は必ず本文書及びご参照になる当社の取扱説明書又は操作手順書に記載の製品とのみ接続及び装着を行って下さい。
3. 本品を当社以外の製品に使用した場合、当社では安全保証の責任を負いかねますのでご了承下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法

室温にて保管して下さい。

【包装】

30セット/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者（輸入元）

バクスター株式会社

〒104-6009 東京都中央区晴海一丁目8番10号

電話番号：03(6204)3700〔ダイヤルイン〕

製造業者：バクスター ヘルスケアS.A.（アイルランド）

Baxter Healthcare S.A.（Ireland）

製造販売元（輸入元）**

バクスター株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号

JLRDPR-SID012